


MASCHERINA MONOUSO 3 VELI

Prodotto utilizzabile ad uso domestico - Tre strati di protezione - Potere filtrante >95%
Confortevole e adatta ad ogni tipo di pelle

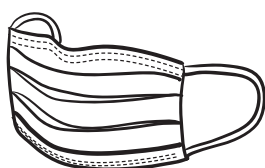

Indossare la maschera posizionando la parte colorata verso l'esterno e gli elastici agganciati alle orecchie.



Allargare la maschera, coprendo interamente il naso e il mento.



Regolare e premere la fascetta metallica con gli indici di entrambe le mani e farla aderire perfettamente al naso.



Sostituire immediatamente nell'eventualità si presenti danneggiata, maleodorante o inumidita

Art. 29288 - Lotto 180320
Importato da:
Maikii Srl,
Via G. Bortolan 44,
31050, Vascon di C. (TV)
Italia

Attenzione: dispositivo monouso,
NON riutilizzare il prodotto.
NON è un dispositivo medico. NON utilizzare in
ambito medico. Gettare nella raccolta indifferenziata.
Direttiva comunitaria applicata:
EN 149:2001+A1:2009 Direttiva DPI 425/2016/UE

Composizione
Primo strato: Polipropilene tessuto-non-tessuto
Secondo strato: Strato filtrante
Terzo strato: Polipropilene tessuto-non-tessuto

Dichiarazione di conformità consultabile al sito
www.maikii.com/schede, inserendo il codice articolo.

